

The image features an abstract graphic on the left side consisting of several overlapping, flowing lines in shades of grey and orange. These lines create a sense of movement and fluidity, resembling a stylized human figure or a dynamic shape. The lines are thin and elegant, with some overlapping to create a layered effect.

Macrolane™ –
für einen anmutig
geformten
Körper

Macrolane™
Gracefully shapes your body



Eine einfache und klare Lösung


Macrolane™ wird von Q-Med mit Hilfe der patentierten NASHA™ Technologie hergestellt. NASHA-Gele, die seit mehr als einem Jahrzehnt bei Schönheitsbehandlungen zum Einsatz kommen, bestehen aus stabilisierter, nicht-animalischer Hyaluronsäure (NASHA). Hyaluronsäure ist eine im Körper natürlich vorkommende Substanz, die in der Haut Wasser bindet und so Volumen erzeugt.

Gracefully shapes your body

Schön sein heißt: Sie selbst sein. Das bedeutet, Ihre Persönlichkeit mit Ihren Lebensgewohnheiten und Ihrem Aussehen zu betonen. Gleiches gilt auch, wenn Sie sich für eine Schönheitsbehandlung entscheiden. Macrolane™ stellt die natürliche Spannkraft und das Volumen Ihrer Haut wieder her, und das mit einer einfachen und sicheren Injektionsbehandlung. Die Behandlung verleiht Ihrem Körper anmutige Formen und stellt verlorenes Volumen umgehend wieder her – für ein natürliches und individuelles Aussehen.

Macrolane wurde von Q-Med entwickelt, der Firma, die auch Restylane™ für die ästhetische Gesichtsbehandlung herstellt. Während Restylane verwendet wird, um Gleichmäßigkeit und Volumen im Gesicht wiederherzustellen, erfüllt Macrolane dieselben Aufgaben für den Körper. Falls Sie in bestimmten Körperarealen mehr Volumen wünschen oder eine bessere Spannkraft erzielen wollen, fragen Sie Ihren Arzt, ob eine Behandlung mit Macrolane das Richtige für Sie ist.




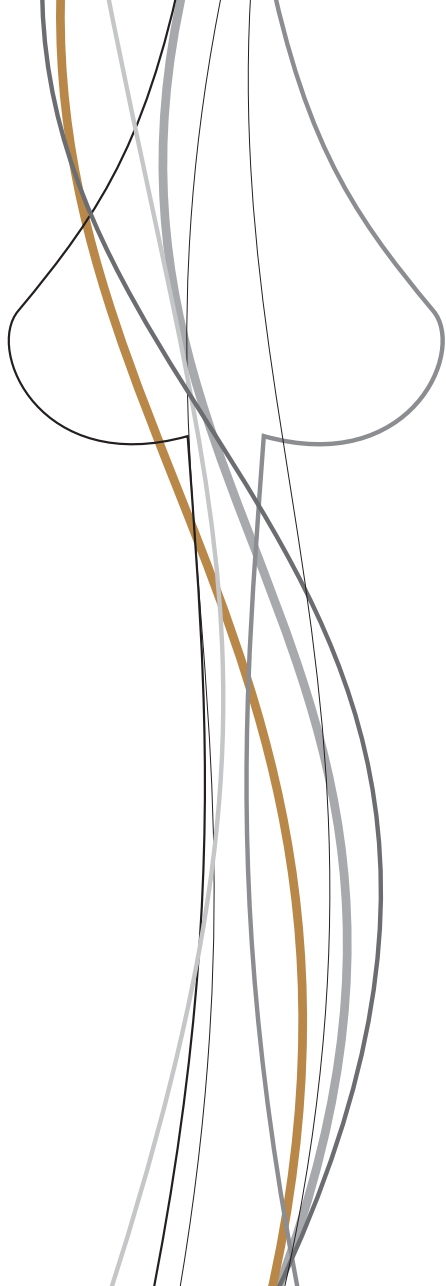

Wirkungsweise von Macrolane™

Eine Behandlung mit Macrolane™ stellt Volumen auf einfache und sichere Weise wieder her und ist dabei weniger invasiv als eine Operation. Die Macrolane Behandlung ist ein ambulantes Verfahren, das ohne Klinikaufenthalt in nur einer Sitzung durchgeführt werden kann.

Während der Behandlung wird das NASHA™ Gel mit einer speziellen Nadel tief unter die Haut gespritzt, um Volumen und Gewebeunterstützung zu geben, ohne störende Narben zu hinterlassen. Zwar ist eine lokale Betäubung des Behandlungsareals ausreichend, Sie können auf Wunsch jedoch auch eine Vollnarkose erhalten.

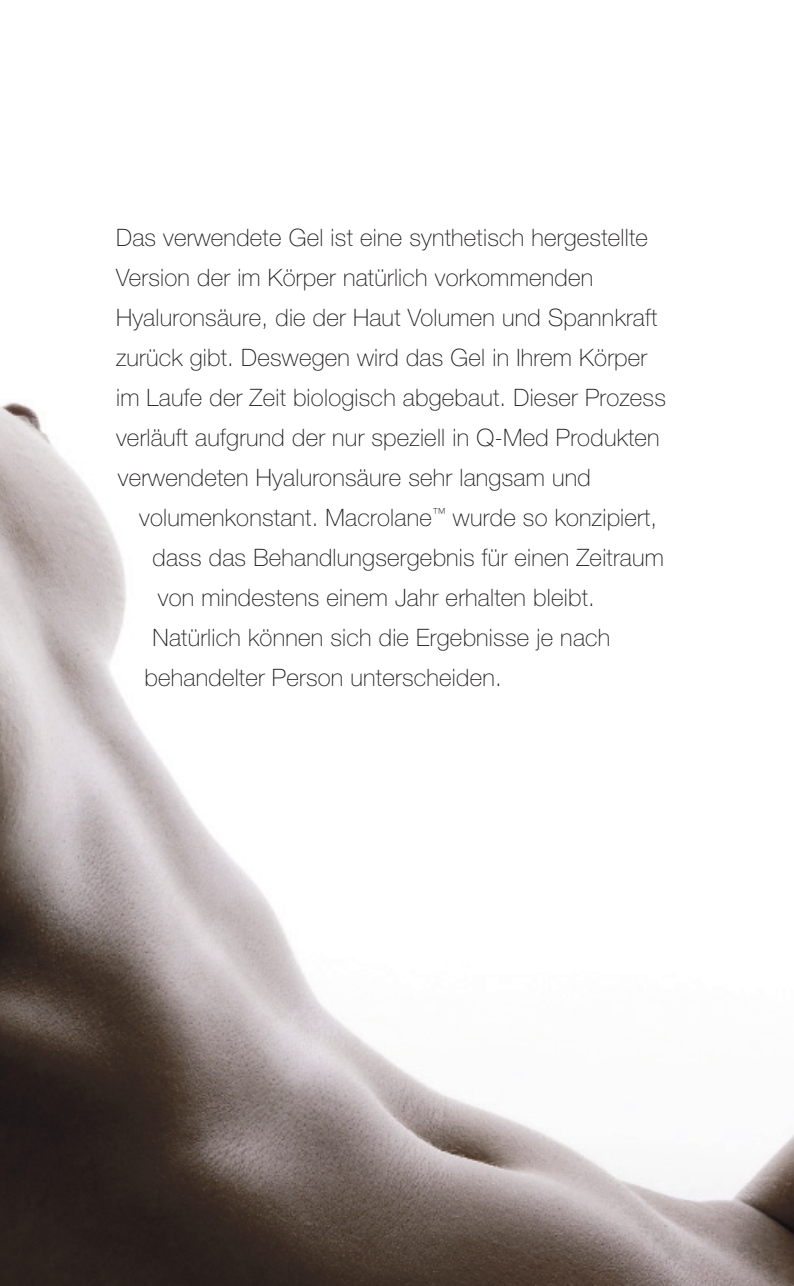

Das verwendete Gel ist eine synthetisch hergestellte Version der im Körper natürlich vorkommenden Hyaluronsäure, die der Haut Volumen und Spannkraft zurück gibt. Deswegen wird das Gel in Ihrem Körper im Laufe der Zeit biologisch abgebaut. Dieser Prozess verläuft aufgrund der nur speziell in Q-Med Produkten verwendeten Hyaluronsäure sehr langsam und volumenkonstant. Macrolane™ wurde so konzipiert, dass das Behandlungsergebnis für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr erhalten bleibt. Natürlich können sich die Ergebnisse je nach behandelter Person unterscheiden.




Nach Ihrer Behandlung

Mit Macrolane™ sind die Behandlungsergebnisse sofort sichtbar – ohne lange Erholungs- bzw. Ausfallzeiten. Gleich nachdem die Behandlung abgeschlossen ist, können Sie Ihren normalen Tagesablauf wieder aufnehmen.

Um das bestmögliche Behandlungsergebnis zu gewährleisten, wird Ihr Arzt Ihnen raten, bestimmte Maßnahmen, bei denen Druck auf den Behandlungsbereich ausgeübt wird, wie z.B. eine Massage, während der ersten Wochen zu vermeiden. In dieser Zeit ist es ebenso ratsam, den behandelten Bereich keinen extremen Temperaturen auszusetzen, wie z.B. in der Sauna oder im Solarium. Eine leichte Rötung, Schwellung, Druckempfindlichkeit oder leichte Schmerzen sind normal. Bei anhaltenden Symptomen sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.

Ist Macrolane™ das Richtige für mich?

Nur ein qualifizierter Arzt kann entscheiden, ob Macrolane™ für Sie geeignet ist. Wir empfehlen Ihnen, sich an einen Arzt zu wenden, der für die Behandlung mit Macrolane geschult und zertifiziert ist.

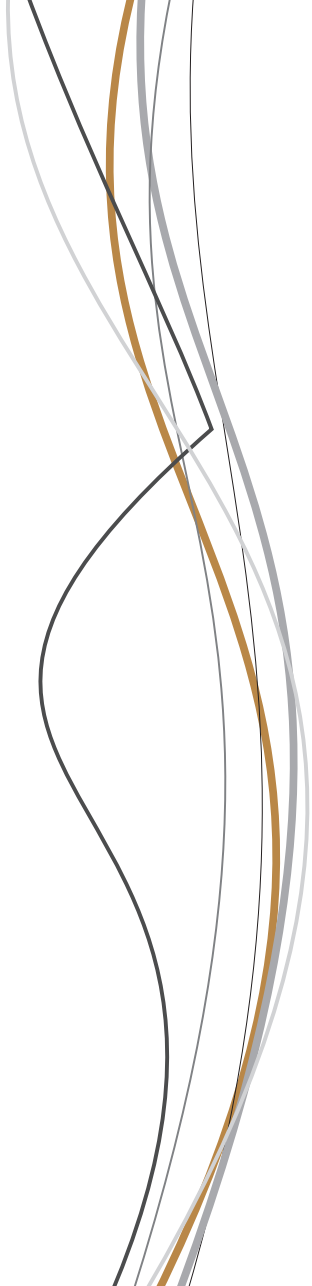

Häufig gestellte Fragen

Welche Studien wurden mit Macrolane™ durchgeführt?

Die Wirksamkeit und Sicherheit von NASHA™ Gel, das in Macrolane™ enthalten ist, wurden in klinischen Studien nachgewiesen.

Darüber hinaus zeigte eine Studie*, welche die Anwendung von Macrolane bei Körperdeformitäten untersuchte, die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts. Es wurden keine Nebenwirkungen oder unerwünschte Reaktionen beobachtet. Weiterführende Studien dienen dazu, weitere Anwendungsmöglichkeiten von Macrolane zu untersuchen und Erkenntnisse über die Injektionstechniken zu gewinnen. Andere Studien untersuchen die Anwendung von Macrolane in der weiblichen Brust.

Ist Macrolane™ ein zugelassenes Produkt?

Ja. Macrolane™ hat das CE-Zeichen der Europäischen Union (EU) erhalten und erfüllt dementsprechend alle relevanten Anforderungen, die in Europa an ein Medizinprodukt gestellt werden.

* Per Hedén, „The Promising Future of Hyaluronic Acid for Body Contouring“ (Vortrag auf dem Anti-Aging Medicine World Congress in Monaco, 22.–24. März 2007). Die Daten liegen Q-Med vor.

Wie unterscheidet sich das Macrolane™ vom Restylane™ Produktprogramm?

Die Produkte der Restylane™ bzw. Macrolane™ Produktreihe sind Gele auf NASHA™-Basis mit unterschiedlicher Festigkeit (Konsistenz), entsprechend der verschiedenen Anwendungsbereiche. Das Restylane Programm dient der Anwendung im Gesicht und wird bei kleineren Behandlungen mit weniger Volumen in einem durch starke Bewegungen gekennzeichneten Areal eingesetzt. Macrolane ist ein dickeres Gel und dient der Anwendung in Körperarealen, in denen Volumen in größerem Umfang wiederhergestellt werden soll.

Kann man Macrolane™ mit der Fettinjektion vergleichen?

Das eigene Körperfett kann von einem Teil des Körpers in einen anderen Teil transplantiert werden, um dort Volumen aufzubauen. Um das Fett zu entnehmen ist ein chirurgischer Eingriff erforderlich sowie eine zweite Operation, um es zu injizieren. Da nicht alle injizierten Fettzellen anwachsen, können in einigen Fällen auch mehrere Sitzungen notwendig werden. Der Nutzen dieser Behandlung liegt darin, dass Ihr eigenes Fett vom körpereigenen Immunsystem nicht abgestoßen

wird. Da Macrolane™ auf einer Substanz basiert, die natürlich im Körper vorkommt, wird es in der Regel ebenfalls nicht vom Körper abgestoßen. Zudem bietet das Produkt eine gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit. Zudem bietet das Produkt eine gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit.

Der Vorteil von Macrolane ist die Kürze der Behandlung in nur einer Sitzung, weitere Operationen sind nicht notwendig. Insbesondere wenn Sie nicht über überschüssiges Fett für eine Transplantation verfügen, kann Macrolane die geeignete Behandlung sein.

Wie wird die Behandlung mit Macrolane™ , durchgeführt?

Eine Vollnarkose ist nicht notwendig? Die Behandlung kann in einem Behandlungsraum ähnlich wie bei einem kleinen chirurgischen Eingriff durchgeführt werden und benötigt etwa 30 – 90 Minuten (abhängig von Körperareal und Menge des injizierten Gels).

Wie kann man Macrolane™ mit den am Markt erhältlichen künstlichen Füllsubstanzen vergleichen?

Synthetische Materialien, die auf anderen Polymeren als Hyaluronsäure basieren, können ebenfalls zur Volumenerhöhung injiziert werden.

Macrolane™

Volume Restoration Factor 20

VRF20
1 x 10 ml

MACROLANE VRF20
1 x 10 ml

VRF20
1 x 10 ml

MACROLANE VRF20
1 x 10 ml

VRF20
1 x 10 ml

MACROLANE VRF20
1 x 10 ml

Macrolane™

Volume Restoration Factor 30

VRF30
1 x 10 ml

MACROLANE VRF30
1 x 10 ml

VRF30
1 x 10 ml

MACROLANE VRF30
1 x 10 ml

VRF30
1 x 10 ml

MACROLANE VRF30
1 x 10 ml

VRF30
1 x 10 ml

MACROLANE VRF30
1 x 10 ml



Solche künstlichen Füllsubstanzen können nicht vom Körper absorbiert werden und sind daher nach einer Injektion nur schwer zu entfernen. Nicht-körpereigene Substanzen können zu Entzündungs- und Abstoßungsreaktionen führen. Da der Körper Macrolane™ biologisch abbaut und rückstandslos ausscheidet, wurden bisher keine Abstoßungen oder allergische Reaktionen beobachtet. Durch den natürlichen Alterungsprozess verändern sich Körper und Haut. So kann Macrolane schrittweise und biologisch durch natürliche Prozesse im Körper abgebaut werden. Künstliche Implantate können sich den Veränderungen nicht anpassen und somit zu unschönen Ergebnissen führen.

Wie lange hält die Wirkung von Macrolane™ an?

Die Wirkung von Macrolane™ ist nicht permanent. Das während der Behandlung injizierte Gel wird im Lauf der Zeit schrittweise biologisch abgebaut. Die Behandlungsergebnisse sollten für mindestens ein Jahr erhalten bleiben.

Welche Körperpartien können mit Macrolane™ behandelt werden?

Mit Macrolane™ können beispielsweise die Rundungen des Gesäßes geformt oder den Waden neue Konturen

verliehen werden. Macrolane kann auch Unebenheiten in Hautoberflächen oder eingesunkene Narben ausgleichen, die nach einer Operation oder Liposuktion auftreten können.

Für die Behandlung des Gesichts ist Macrolane nicht geeignet, hierfür stehen die Restylane-Produkte zur Verfügung.

Wie kann man die Vorteile von Macrolane™ zusammenfassen?

- Minimal-invasive Prozedur verursacht keine Narben
- Keine Operation, keine Vollnarkose notwendig
- Kurze Erholungszeit
- Natürliches Material im Körper (Hyaluronsäure)
- Sofort sichtbares Ergebnis

Q-MED

Q-Med GmbH
Berliner Ring 89
64625 Bensheim
Tel: 0 62 51 - 770 79 0
Fax: 0 62 51 - 770 79 290
www.macrolane.de
www.q-med.com